

**ZOLL AED 3™**

Skrócona instrukcja obsługi



**ZOLL®**

## Witamy

Dziękujemy za wybranie urządzenia ZOLL AED 3™ jako automatycznego defibrylatora zewnętrznego, obecnie najnowocześniejszego automatycznego defibrylatora zewnętrznego na świecie. Ta prosta instrukcja pomoże zainstalować urządzenie AED 3 w zaledwie kilka minut. Po zakończeniu instalacji należy zanotować numer seryjny urządzenia i zalogować się na stronie [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com), aby zarejestrować urządzenie AED 3 w celu uzyskania przedłużonej gwarancji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą ZOLL pod numerem telefonu +1-978-421-9655, wysłać wiadomość e-mail na adres [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com) lub zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora, u którego zakupiono urządzenie AED 3.

# Zawartość

Teczka z dokumentacją:

- Skrócona instrukcja obsługi
- Certyfikat aktywacji PlusTrac™
- Plakat/przewodnik przeprowadzania akcji ratunkowej za pomocą urządzenia ZOLL AED 3
- Instrukcja obsługi urządzenia ZOLL AED 3

Zawartość opakowania:

- ZOLL AED 3
- Teczka z dokumentacją
- Elektrody CPR Uni-padz™
- Bateria urządzenia ZOLL AED 3

## Rejestrowanie urządzenia AED

Zalogować się na stronie: [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com), aby:


- Zarejestrować się w celu uzyskania bezpłatnej dwuletniej przedłużonej gwarancji
- Założyć konto PlusTrac na podstawie certyfikatu aktywacji PlusTrac\*, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z systemu PlusTrac przez pierwszy rok
  - Możliwość śledzenia stanu gotowości urządzenia AED 3
  - Możliwość śledzenia przebiegu szkolenia ratowników
  - Zarządzanie programem AED na bieżąco w sieci
  - Możliwość otrzymywania przypomnień i ostrzeżeń drogą elektroniczną
  - Regularne wysyłanie przez urządzenie AED 3 raportów z wynikami autotestu do systemu PlusTrac za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi
- Użytkownik otrzyma informacje dotyczące konfiguracji konta internetowego ZOLL do pobierania danych dotyczących zdarzeń klinicznych i zarządzania nimi w programie ZOLL Case Review™

\* Certyfikat aktywacji znajduje się w teczce z dokumentacją


## Instalowanie urządzenia ZOLL AED 3




Wyjąć całą zawartość z opakowania transportowego.

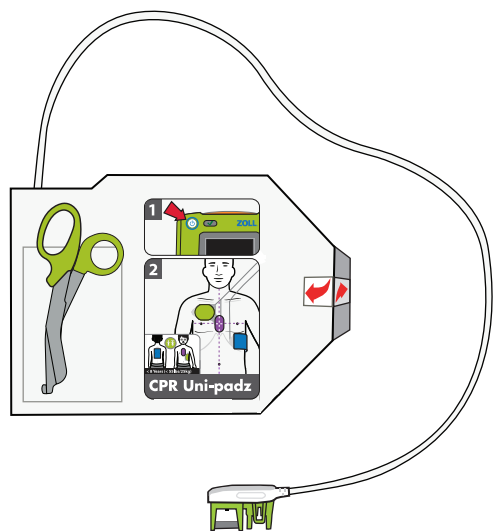


Wyjąć elektrody CPR Uni-padz z opakowania ochronnego.

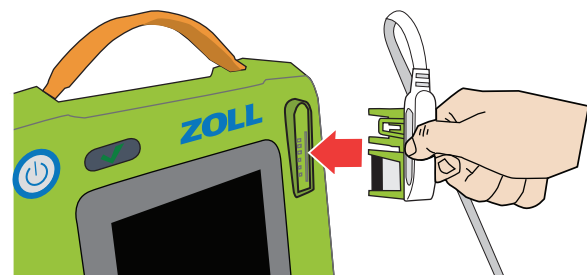


Podłączyć złącze kablowe elektrod CPR Uni-padz do portu elektrod urządzenia AED 3.

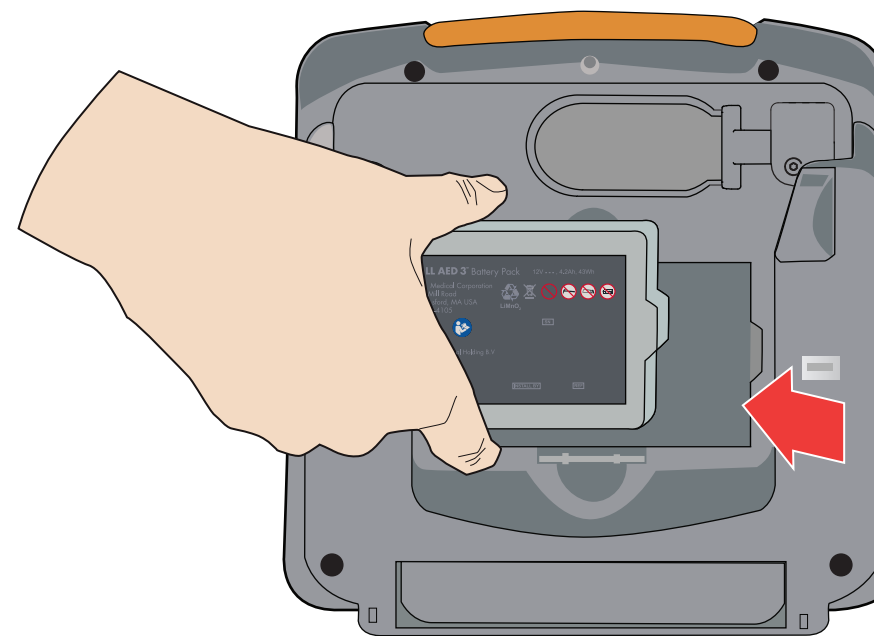

Wyjąć baterię urządzenia AED 3 z opakowania transportowego. Trzymać baterię za boczne krawędzie, etykietą do góry. Umieścić baterię w tylnej części urządzenia AED, aż zatrzaśnie się na miejscu, ustawiając wypustkę na końcu baterii w odpowiedniej wnęce komory baterii.

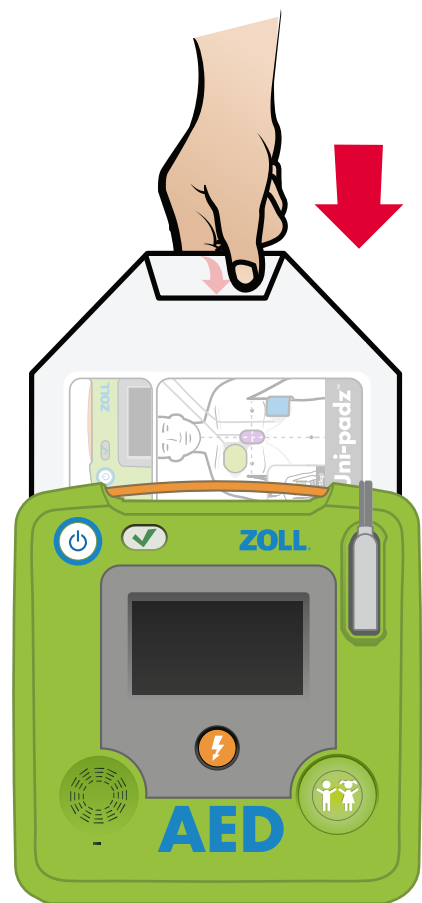

Urządzenie ZOLL AED 3 przeprowadzi automatyczny autotest. Podczas autotestu należy umieścić elektrody CPR Uni-padz w tylnej części urządzenia AED, tak aby etykieta na opakowaniu była skierowana w stronę użytkownika.

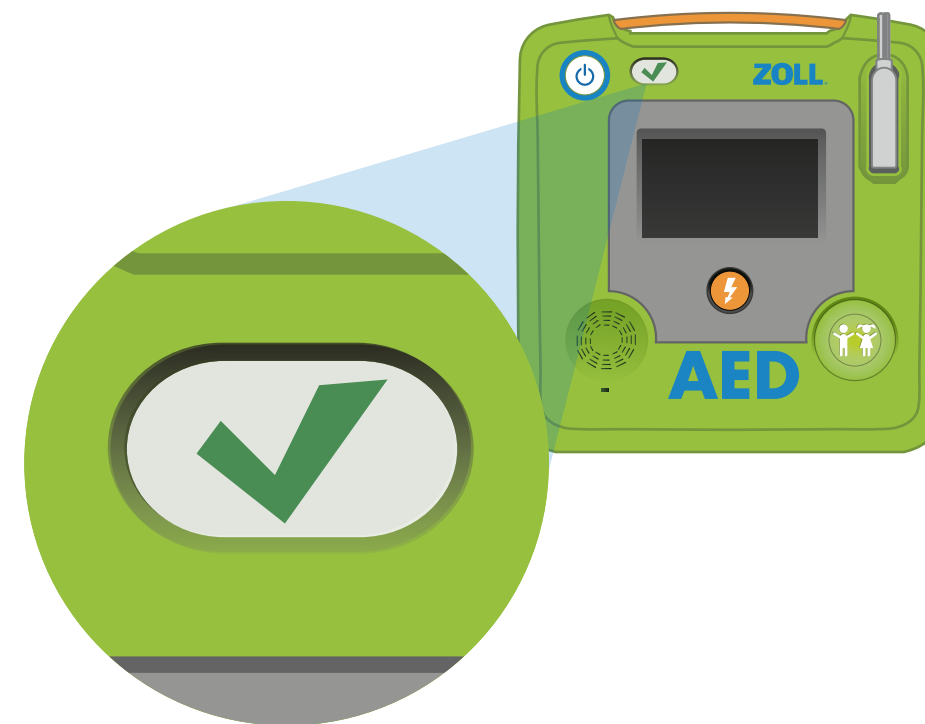

Po zakończeniu autotestu urządzenia AED 3 należy potwierdzić jego pomyślny przebieg na podstawie komunikatu dźwiękowego „Urządzenie sprawne” lub zielonego symbolu w oknie znacznika stanu. Urządzenie AED 3 jest gotowe do użycia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się w teczce z dokumentacją.

**Pytania:**

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy ZOLL lub lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL

**Dział pomocy technicznej firmy ZOLL:**

Telefon: +1-978-421-9655

E-mail: [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com)